

## Votre kit contient :



Auto-piqueurs x 2  
bleus pour adultes  
et roses pour  
enfants



Sachet noir  
(contenant un  
sachet anti-  
humidité)



Buvard



Sachet hermétique



Enveloppe bleue  
retour

Pour toute question sur la COVID-19 :  
**0 800 130 000**  
24h/24 et 7j/7



FONDATION JEAN DAUSSET

Centre d'Etude du Polymorphisme Humain  
Human Polymorphism Study Center



UNITÉ DES VIRUS ÉMERGENTS  
INSERM1207 - IRD190 - AMU - EFS - IRBA

# Étude COVID-SéroPRIM



COVID-SéroPrim

MODE D'EMPLOI  
De l'auto-prélèvement  
Sur papier buvard

(10 minutes environ)

Pour plus d'information sur l'étude ou pour  
retrouver le lien vers la plateforme  
du questionnaire :

**seroprim.sentiweb.fr**  
**rs-seroprim@iplesp.upmc.fr**  
**01 44 73 89 52**

L'AFPA, IQVIA, ReCOL et le réseau Sentinelles  
s'associent dans le projet SeroPRIM pour faire  
avancer la recherche sur le COVID-19 et vous  
proposer ce prélèvement.

Merci d'accepter d'y participer

Lors de la réalisation de l'auto-prélèvement sanguin, si vous ressentez  
un quelconque effet indésirable, informez sans hésiter le Dr Thierry  
Blanchon, par email ou téléphone pour lui signaler :

- 01 44 73 84 35
  - thierry.blanchon@iplesp.upmc.fr
- Pour toute autre demande merci de vous référer au numéro dans  
l'encadré ci-dessus.

# Préparer

Avant de commencer, lisez attentivement le mode d'emploi. Attention, afin de garantir les résultats de l'étude, le prélèvement doit être effectué par la personne à laquelle le kit a été adressé.



1. Connectez-vous au site de l'étude. Saisissez le numéro de votre buvard.



2. Lavez-vous soigneusement les mains et essuyez-les (serviette propre, papier absorbant ou mouchoir jetable).



3. Placez le buvard sur un support plat, propre et sec (votre buvard se trouve dans le sachet noir).



4. Choisissez un doigt (majeur, annulaire, auriculaire), de préférence de la main gauche si vous êtes droitier ou de la main droite si vous êtes gaucher.



5. Massez votre doigt pendant 30 sec, de la paume vers le bout du doigt pour augmenter le flux sanguin.

# Piquer




1. Prenez l'auto-piqueur et faites tourner l'embout jusqu'à ce qu'il se détache.



2. Posez l'auto-piqueur sur le bout du doigt. Pressez-le sur le doigt jusqu'à ce que le clic se déclenche. Vous allez sentir un picotement. C'est normal.



3. Une fois piqué, massez le bout de votre doigt afin d'augmenter la taille de la goutte de sang.

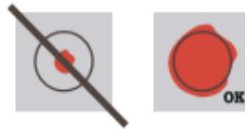

4. Déposez les gouttes de sang sur le premier cercle du buvard. Les gouttes doivent remplir complètement le cercle. Massez votre doigt et répétez cette opération pour remplir complètement le plus de cercles possible.




5. Si le premier auto-piqueur n'a pas bien fonctionné ou si la première piqûre ne vous a pas permis de bien remplir les cinq cercles, utilisez le second auto-piqueur.



6. Enfin, essuyez la piqûre avec une serviette propre, du papier absorbant ou un mouchoir jetable et mettez un pansement.

# Envoyer

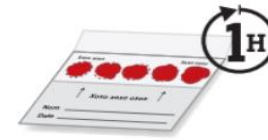

1. Laissez sécher le buvard à l'air libre au moins une heure.



2. Jetez les 2 auto-piqueurs dans une poubelle DASRI de votre lieu de travail. Un sachet hermétique vous est fourni pour faciliter le transport.



3. Après séchage, indiquez la date de prélèvement et le prénom (membres du foyer) sur le buvard. Refermez-le bien.

**Attention :** remplir le questionnaire SeroPRIM le même jour.



4. Placez le buvard dans le sachet noir contenant le sachet anti-humidité et fermez le sachet.



5. Glissez le sachet noir avec le buvard et le sachet anti-humidité dans l'enveloppe bleue retour.



6. Déposez l'enveloppe dans une boîte aux lettres de rue dès que possible. Inutile d'affranchir, l'envoi est prépayé.

